




**Relaxmedic**

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## NASAL CLEAN

RM-IN4545A

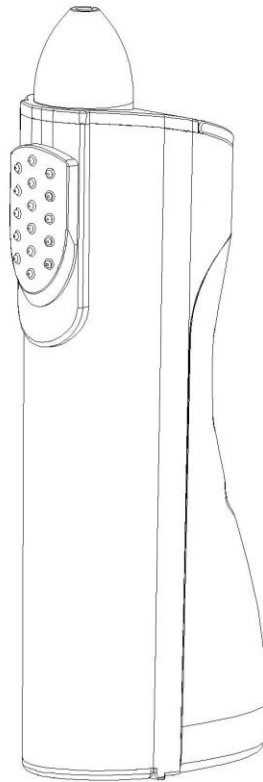

MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

## Índice

1. CUIDADOS.....	4
2. LIMPEZA.....	5
3. FUNCIONAMENTO.....	7
4. AVISO.....	7
5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS.....	8
6. TERMOS DE GARANTIA.....	8

---

**Apresentação:**

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de higiene, fitness e beleza.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto. Todas as informações contidas nesta seção são fornecidas para instruí-lo a evitar lesões a si mesmo e outras pessoas, bem como danos materiais.

O Irrigador Nasal é livre de BPA conservante e seguro para o uso diário. Use de 1 a 2 vezes por dia. Use o Irrigador Nasal para reduzir o risco de sintomas da gripe, alergia e sinusite, incluindo:

- Secura e alergia nasal
- Pressão sinusal e congestão nasal
- Sintomas nasais de gripe e resfriado
- Irritação nasal proveniente de poeira, fumaça, pelos de animais, grama, pólen e fumaça

**IMPORTANTE**

Caro consumidor,

É possível que no primeiro uso, seu irrigador nasal demore a expelir o soro fisiológico.

Para resolver basta seguir as instruções abaixo:

- Cubra com o dedo o orifício de saída;
- Ligue o aparelho;
- Em poucos segundos o soro começará a fluir.

## 1. CUIDADOS

**Leia todas as instruções antes de usar este aparelho.**

### **Atenção**

- Para evitar ferimentos, não use o Irrigador Nasal se a sua via nasal estiver completamente obstruída.
- Para evitar ferimentos, não use este aparelho se você tiver uma infecção no ouvido ou estiver sofrendo pressão no ouvido.
- Para evitar ferimentos, não use em crianças menores de 6 anos de idade.
- Este aparelho não foi projetado para uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Para evitar ferimentos, não utilize este produto após uma cirurgia nasal ou sinusal.
- Para evitar ferimentos, não use este produto se você tiver feridas abertas ou sangramento em suas vias nasais ou sinusais.
- Use somente de acordo com estas instruções. Este aparelho foi projetado apenas para irrigação nasal. Não direcione a água para dentro do ouvido, sob a língua ou outras áreas delicadas.
- Use com solução salina, até 240 ml, morna
- Não utilize água quente acima de 40°C
- Soro fisiológico é ideal para manter o nariz limpo e não possui efeito colateral.
- Não use este produto se ele não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou danificado, ou caído em qualquer outro líquido.
- Não mergulhe o aparelho na água ou qualquer outro líquido.
- Para evitar ferimentos, não use enquanto estiver usando joias no nariz.
- Não deixe cair objetos estranhos na mistura de solução salina.
- Este aparelho não foi projetado para tratamento médico.
- Este aparelho não possui fins terapêuticos e foi projetado apenas para uso doméstico, não profissional.
- Crianças deverão ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- Mantenha o aparelho higienizado. Certifique-se de jogar fora a água contida dentro do reservatório e mantenha o aparelho ligado durante 2 a 3 segundos para drenar a água após o uso. Não fazer isso pode resultar em danos à sua saúde se usado sem mantê-lo higienizado devido à propagação de fungos e bactérias. Também pode resultar em mau cheiro e mau funcionamento.

---

## 2. LIMPEZA

Há um risco de propagação de bactérias, por isso, lave bem e seque o irrigador nasal antes de guardar.

Para guardar em uma bolsa ou objeto semelhante depois de usar o aparelho, enrole-o em uma toalha ou item semelhante para absorver o excesso de água.

Para impedir a propagação de bactérias, tire o aparelho da bolsa ou objeto semelhante o mais rápido possível para secar.

### **Bico macio**

Retire o bico macio do corpo do aparelho.

Lave-o com água e seque-o com um pano.

### **Corpo principal**

Mantenha o aparelho ligado por 2 ou 3 segundos até a água parar de sair.

Retire a sujeira e limpe o aparelho com um pano umedecido com sabão líquido neutro e em seguida limpe com um pano seco.

Limpe com um pano úmido se estiver muito sujo.

Não limpe o aparelho com diluentes, benzina, álcool, etc.

Fazer isso pode resultar em mau funcionamento, rachaduras ou descoloração das peças.

Não lave com água quente acima de 50°C.

Certifique-se de que a tampa do compartimento de pilhas esteja bem fechada.

Não mergulhe o aparelho na água.

Não lave o corpo principal do aparelho na máquina lava-louças.

Seque depois de lavar com água.

Retire as pilhas quando não for utilizar um aparelho por um longo período.

### **Tubo de sucção de água**

Retire o tubo de sucção de água do aparelho.

Lave-o com água e seque-o com um pano.

Não dobre o tubo de sucção de água.

Fazer isso poderia resultar em problemas tais como a interrupção no funcionamento do tubo de sucção da água.

### **Reservatório**

Não se esqueça de jogar fora a água contida dentro do reservatório.

Remova o reservatório e limpe-o bem com uma escova de garrafa e detergente.


Enxágue com água e seque com um pano.

Seque o reservatório quando não for usar o aparelho por um longo período.

Use apenas detergente neutro.

Nunca utilize diluentes, benzina ou álcool, pois isso pode causar mau funcionamento, rachaduras ou descoloração das peças.

### 3. DETALHES DO PRODUTO

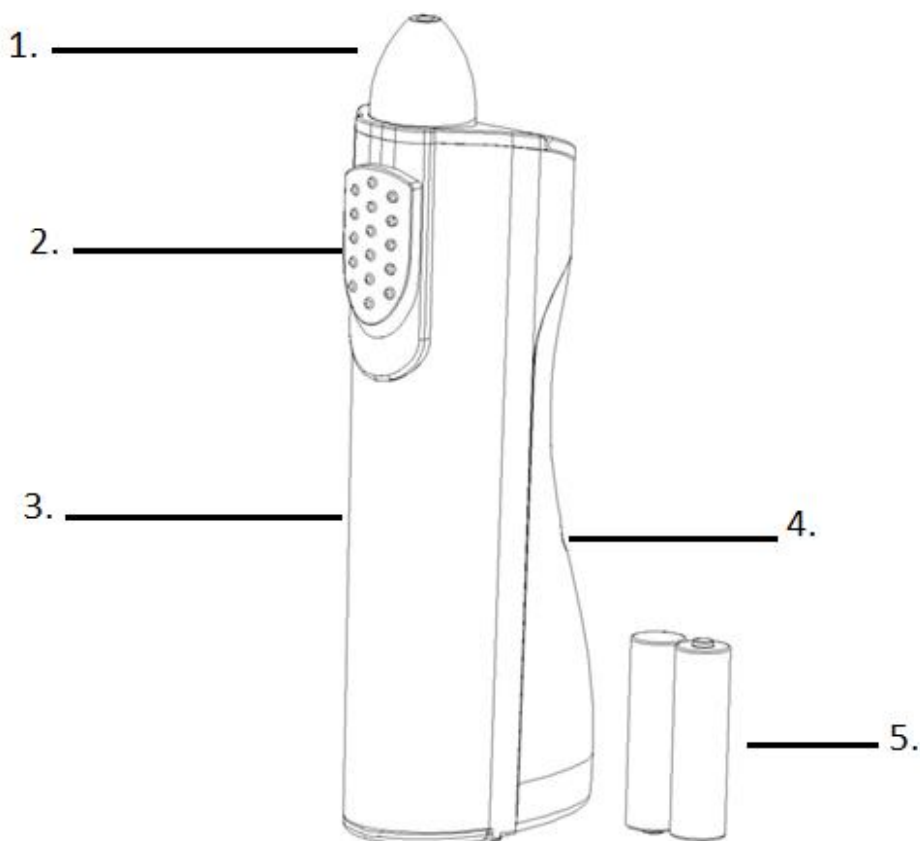

1. Bico macio
2. Botão "On/Off" ("Ligar/Desligar")
3. Corpo principal
4. Reservatório
5. Tampa do compartimento de pilha e pilhas (não inclusas)

Para melhores resultados, faça a lavagem sinusal com o Irrigador Nasal de 1 a 2 vezes por dia. Utilize soro fisiológico ou solução caseira. Se a sua via nasal estiver completamente obstruída ou se você tiver uma infecção no ouvido ou estiver sofrendo pressão no ouvido, interrompa a lavagem nasal e consulte o seu médico.

### **3. FUNCIONAMENTO**

Poderá haver um pouco de líquido restante no interior do corpo principal do aparelho antes do uso (reservatório, tubo de sucção de água, etc.), esta é a água destilada remanescente que foi usada no teste de desempenho (fluxo de água) do aparelho para evitar problemas de saúde.

#### **Preparação do Irrigador Nasal para Uso**

1. Instale a ponta do bico macio (dois bicos estão inclusos)
2. Alinhe o tanque azul com a posição desbloqueada na unidade principal e pressione juntos, girando o tanque azul até a posição fechada. Agite cuidadosamente para dissolver a mistura.
3. De pé, na frente de uma pia, dobre-se para o seu nível de conforto e incline a cabeça para baixo. Coloque o bocal macio na sua narina, abra sua boca levemente. Pressione o botão azul de ligar / desligar até a solução começar a drenar da sua outra passagem nasal. Aconselha-se pelo menos 120 ml de solução (aproximadamente 15 segundos) para limpar e hidratar para uma narina, depois suavemente o nariz para remover muco, bactérias e qualquer excesso de água do nariz. Repita no lado oposto da passagem nasal. Pare de pressionar o botão ligar / desligar se sentir desconforto, dor ou pressão durante a irrigação.
4. Descarte toda a solução restante e limpe bem o bocal e o tanque de água azul com água de sabão após o uso

Limpe muito bem o seu irrigador nasal antes de cada uso.

#### **SOLUÇÃO NASAL:**

- recomendamos o uso de soro fisiológico
- você pode fazer sua própria solução nasal, misturando 500 ml de água filtrada e fervida, 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio.
- o uso de água pura não é recomendado
- o uso incorreto de solução podem irritar as mucosas nasais.

### **4. AVISO**

#### **Informações Sobre Pilhas**

- Coloque as pilhas corretamente, observando a polaridade.
- Retire as pilhas gastas do corpo principal do aparelho e descarte-as adequadamente.
- Retire as pilhas quando não for utilizar um aparelho por um longo período.
- Não descarte as pilhas no fogo.

#### **Não desmontar**

---

Nunca modifique o aparelho. Além disso, não desmonte nem tente consertar o aparelho por conta própria.

## 5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de Alimentação: 2 pilhas do tipo AA.

Capacidade do reservatório: Aprox. 200 ml

Dimensões: 21 x 8 x 5 cm

Peso: 0,196 kg

## 6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688