



**Relaxmedic**

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## ALMOFADA PARA PERNAS

RM-AO3772A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

## Índice

1. CUIDADOS .....	3
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	3
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	3
5. TERMOS DE GARANTIA.....	3

### **Apresentação:**

Você acaba de adquirir um produto da nova linha Dr. Coluna!

O Assento Ortopédico Dr. Coluna marcou o início da história Relaxmedic. A história começa em 1993, com a chegada desse produto inovador para auxiliar a postura correta das pessoas que ficavam muito tempo sentadas, trabalhando ou dirigindo. Mais de uma década depois, o sucesso continua.

O Dr. Coluna ganhou tanta força no mercado que deixou de ser apenas um produto para se tornar a marca Dr. Coluna, conta com uma linha completa de produtos indicados para diversas partes do corpo como região lombar, pescoço, costas, cóccix e pernas.

A nova linha de produtos surgiu para continuar colaborando com a saúde e qualidade de vida dos brasileiros. O Dr. Coluna é um verdadeiro especialista em conforto.

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

### ALMOFADA PARA PERNAS

Alinha pernas e joelhos para posição adequada ao dormir, elimina os pontos de pressão e auxilia na redução de dores musculares.

- AUXILIO NO ALÍVIO PARA DOR: Alívio para tensão, evita rigidez muscular da região do quadril, pernas e joelhos, fornece apoio para correção postural.
- ESPUMA COM MEMÓRIA: Adapta-se ao formato do corpo para conforto completo.
- ERGONÔMICO: Curvas suaves adequadas para qualquer tipo de pessoa.
- ALINHA A COLUNA: Promove a postura saudável e alinha a coluna vertebral.

---

## 1. CUIDADOS

- Este produto foi projetado somente para uso doméstico/residencial.
- Não permita que o produto seja usado como um brinquedo.
- Não use o produto se a capa de tecido estiver rasgada.
- O produto não foi projetado para o uso de pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Caso sinta dor forte ou anormal durante o uso, interrompa o uso e procure um médico.
- Em caso de deformação fora do padrão, procure a assistência técnica.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.

## 2. LIMPEZA

- Produto: Recomendamos que seja utilizado somente um pano seco para a limpeza.
- Capa: removível e lavável.

## 3. MODO DE USAR

### Sugestão de Uso

- Coloque o assento sofá, cadeira e afins.

## 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 25 x 20,5 cm

Peso: 0,575 kg

Garantia: 1 ano

Densidade da Espuma: 45D

% Espuma e Gel: 100% Foam

## 5. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

---

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **5 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para este produto.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688